


Veiligheidsvoorschriften


- Lees de gebruikershandleiding (te vinden op: www.lopital.nl) vóór gebruik zorgvuldig door.
- Maximale belasting 150 kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens persontfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Voorsluiting gesloten bij hoog / laag bewegen en armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.

Bediening Hydraulisch

Omhoog

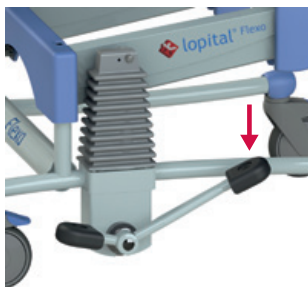

Omlaag

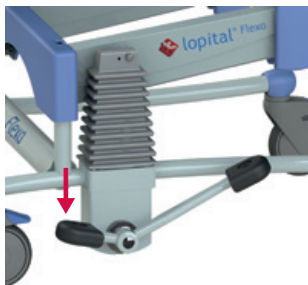

Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding.




Gebruik

1. Breng de stoel in de juiste positie en klap de voetensteunen omhoog.
2. Zet de stoel op de rem!
3. Open de armleggers en klap deze zo nodig omhoog.
4. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
5. Sluit de armleggers en laat de voeten van de persoon met beperking op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

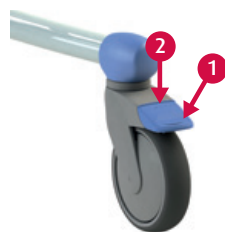


Voetensteun



Beide voetplaten dienen weggeklapt te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Dit kan door middel van het opklappen van de voetplaten (1) of door het wegdraaien van beide steunen (2). Zorg ervoor dat de persoon met beperking met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

Armlegger met voorsluiting

1. Ontgrendelen.
2. Roteren.
3. Opklappen.

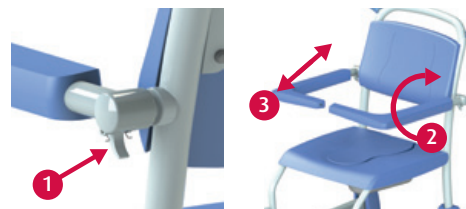

Toiletfunctie

- Verwijder voordat de persoon met beperking plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* De Flexo kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Flexo kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

Reiniging en onderhoud

De Flexo dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Het volledige onderhoudsschema is te vinden in de gebruikershandleiding (**te vinden op: www.lopital.nl**).

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Gebruikershandleiding


Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: **www.lopital.nl**

Instructions de sécurité


- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 150 kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Les pieds doivent être placés sur le repose-pied.
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras du client sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse lors des déplacements et des manœuvres.

Commande

Réglage vers le haut

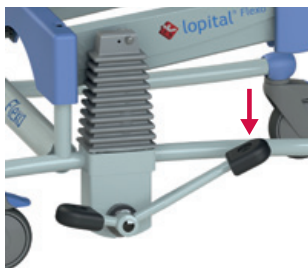

Réglage vers le bas

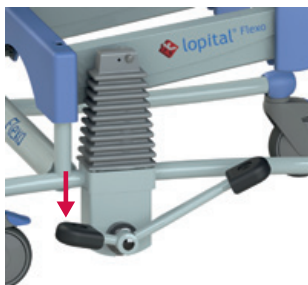

Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.




Utilisation

1. Ajustez la position de la chaise et rabattez le repose-pied vers le haut.
 2. Verrouillez le frein de roues.
 3. Ouvrez les accoudoirs et au besoin rabattez-les vers le haut.
 4. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assoie.
 5. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les palettes repose-pieds.
- Lorsque la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

Frein de roue

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

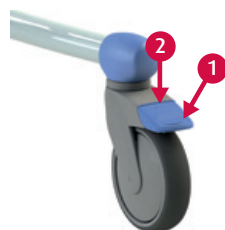


Repose-pied



Les deux palettes repose-pied doivent être rabattues lorsque la personne à mobilité réduite va s'asseoir sur la chaise. Rabattez vers le haut les palettes (1) ou écartez les deux appuis (2). Veillez à ce que la personne à mobilité réduite garde les deux pieds sur les palettes lorsque la chaise est en déplacement.

Accoudoir avec fermeture avant

1. Déverrouillage.
2. Rotation.
3. Rabattre vers le haut.

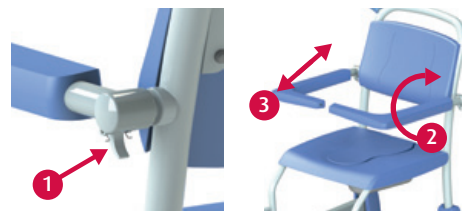

Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : la chaise Flexo peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Flexo peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Flexo doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.
Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur :
www.lopital.fr