

Veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruikershandleiding (te vinden op: www.lopital.nl) vóór gebruik zorgvuldig door.
- Maximale belasting 135kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens persontferingen van en naar de stoel.
- Zet de voetensteun op de juiste hoogte en plaats de voeten op de voetensteun.
- Hoofdondersteuning juist instellen (vooral bij kantelen).
- Voorsluiting gesloten bij hoog / laag bewegen en armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.

Bedieningspaneel

Omhoog



Voorwaarts kantelen



Activeren



Omlaag



Achterwaarts kantelen



Vergrendelknop



Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding.




Gebruik

1. Activeer de Reflex door middel van de twee omhoog knoppen gelijktijdig 1 seconde in te drukken.
Let op: Na gebruik gaat de Reflex binnen 60 minuten in slaapstand.
2. Breng de stoel in de juiste positie, ook de hoofd- en voetensteun (of klap deze omhoog).
3. Zet de stoel op de rem!
4. Open de armleggers en klap deze zo nodig omhoog.
5. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
6. Sluit de armleggers.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde. Alle functies van de Reflex worden uitgeschakeld door middel van de vergrendelknop. De Reflex dient te worden gereset. Dit doet u door 4 seconden beide omhoogknoppen in te drukken.

Wielblokkering

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

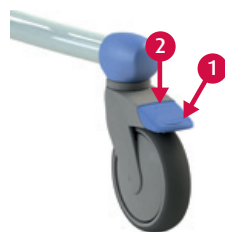


Voetensteun



1. Ontgrendelen.
2. Complete voetensteun afnemen.
3. Gewenste positie kiezen.
4. Inhaken en vergrendelen.

Hoofdondersteuning

1. Instellen hoogte steun.
2. Instellen diepte steun.

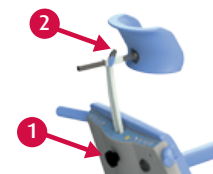

Armlegger met voorsluiting

1. Ontgrendelen.
2. Roteren.
3. Opklappen.



Opladen batterij

Sluit de Reflex na gebruik aan op de lader, voor het behoud van de batterijen.



Uit
Groen
Knippert rood
Rood

Slaapstand.
Stoel bedrijfsklaar.
Batterij bijna leeg.
Batterij leeg.

Tijdens het laden werkt de Reflex niet.

Toiletfunctie

- Verwijder voordat de persoon met beperking plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* De Reflex kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Reflex kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

Nooddaal

Als alle functies van de Reflex uitgevallen zijn, is het mogelijk de stoel te laten zakken met behulp van de nooddaal hendel.



Reiniging en onderhoud

De Reflex dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Het volledige onderhoudsschema is te vinden in de gebruikershandleiding (**te vinden op: www.lopital.nl**).

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: **www.lopital.nl**

Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 135kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Ajustez la hauteur du repose-pied et placez-y les pieds du client.
- Ajustez l'appuie-tête (notamment pour le basculement).
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras du client sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse lors des déplacements et des manœuvres.

Panneau de commande

Réglage vers le haut



Basculement avant



Mise en marche



Réglage vers le bas



Basculement arrière



Bouton de verrouillage



Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.




Utilisation

1. Allumez la chaise Reflex en enfonçant simultanément les 2 boutons de réglage vers le haut pendant 1 seconde.
Remarque : Après utilisation, la chaise Reflex se met en veille après 60 minutes.
2. Ajustez la position de la chaise, de l'appuie-tête et du repose-pied (ou rabattez-le vers le haut).
3. Verrouillez le frein de la chaise.
4. Ouvrez les accoudoirs et au besoin rabattez-les vers le haut.
5. Assistez la personne à mobilité réduite au moment où elle s'assied.
6. Réfermez les accoudoirs. Quand la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.


Pour éteindre toutes les fonctions de la chaise Reflex, utilisez le bouton de verrouillage. Pour ensuite rallumer la chaise Reflex, enfoncez les deux boutons de réglage vers le haut pendant 4 secondes.

Frein de roue

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

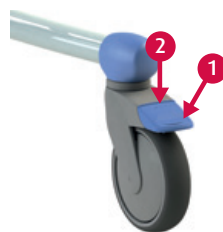


Répose-pied

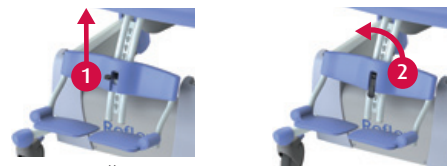

1. Déverrouillage.
2. Retirer le repose-pied complet.
3. Sélectionner la position désirée.
4. Insérer et verrouiller.

Appuie-tête

1. Réglage en hauteur.
2. Réglage en profondeur.

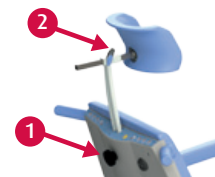

Accoudoir avec fermeture avant

1. Déverrouillage.
2. Rotation.
3. Rabattre vers le haut.



Rechargement des batteries

Après utilisation, raccordez la chaise Reflex au chargeur afin de maintenir les batteries opérationnelles.



Éteint	État de veille
Vert	Chaise opérationnelle
Rouge clignotant	Batterie quasi déchargée
Rouge	Batterie déchargée

Pendant le chargement des batteries, le Reflex n'est pas utilisable.

Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : La chaise Reflex peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Reflex peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Abaissement d'urgence

En cas d'arrêt de toutes les fonctions du Reflex, utilisez la manivelle d'urgence pour faire descendre le siège.



Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Reflex doit être nettoyée à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant.

Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.

Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr