

Veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruikershandleiding (te vinden op: www.lopital.nl) vóór gebruik zorgvuldig door.
- Maximale belasting 220kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens persoons transfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetensteun.
- Armleggers gesloten bij hoog / laag bewegen en armen op armlegger laten rusten.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in een lage positie.

Bedieningspaneel



Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding.



Gebruik

1. Activeer de Elexo XXL door middel van de omhoogknop 2 seconden in te drukken. Let op: Na gebruik gaat de Elexo XXL binnen 60 minuten in slaapstand.
2. Breng de stoel in de juiste positie en klap de voetensteunen omhoog.
3. Zet de stoel op de rem!
4. Klap de armleggers zo nodig omhoog.
5. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
6. Sluit de armleggers en laat de voeten van de persoon met beperking op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

Wielblokkering




Richtings- / geremd wiel

1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.




Voetensteun

Beide voetensteunen dienen weggedraaid te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Zorg ervoor dat de persoon met beperking met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

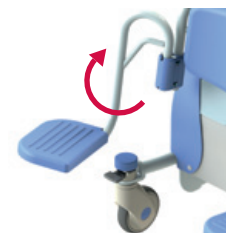

Armlegger zonder voorsluiting

1. Ontgrendelen.
2. Naar achter draaien. Sluiten in omgekeerde volgorde.

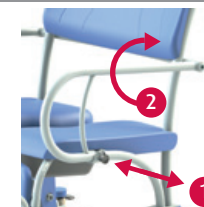

Opladen batterij

Sluit de Elexo XXL na gebruik aan op de lader, voor het behoud van de batterijen.



Uit	Slaapstand.
Groen	Stoel bedrijfsklaar.
Knippert oranje	Noodstop is geactiveerd.
Oranje	Batterij is half leeg.
Knippert rood	Batterij bijna leeg.
Rood	Batterij leeg.


Tijdens het laden werkt de Elexo XXL niet.

Toiletfunctie

- *In combinatie met toilet:* De Elexo XXL kan over bijna ieder toilet gereden worden. Beweeg de stoel omhoog of omlaag voor de juiste positie.
- *Met ondersteek:* De Elexo XXL kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

Nooddaal

Als alle functies van de Elexo XXL uitgevallen zijn, is het mogelijk de stoel te laten zakken met behulp van de nooddaalknop.

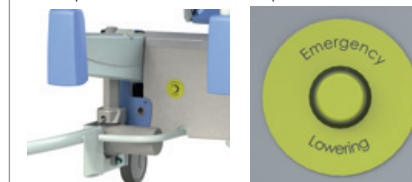

Reiniging en onderhoud

De Elexo XXL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Het volledige onderhoudsschema is te vinden in de gebruikershandleiding (**te vinden op: www.lopital.nl**).

In geval van storing contact opnemen met Lopital.
Tel: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: **www.lopital.nl**

Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 220kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Placez les pieds de la personne sur le repose-pied.
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras du client sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse en déplacement ou en manœuvre.

Panneau de commande

Réglage vers le haut




Réglage vers le bas



Mise en marche



2 secondes

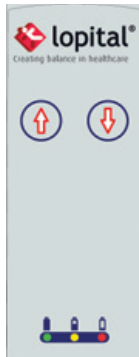

Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.



Utilisation

1. Allumez l'Elexo XXL en enfonçant pendant 2 secondes le bouton de réglage vers le haut. Rem. : Après utilisation, l'Elexo XXL se met en veille après 60 minutes.
2. Ajustez la position de la chaise et relevez le repose-pied.
3. Verrouillez le frein de la chaise.
4. Au besoin, rabattez les accoudoirs vers le haut.
5. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assied.
6. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les repose-pieds. Lorsque la personne se remet debout, procédez dans l'ordre inverse.

Frein de roue



1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.


Roue directionnelle / à frein



1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.


Repose-pied

Les deux repose-pieds doivent être écartés lorsque la personne à mobilité réduite s'assied sur la chaise. Assurez-vous que la personne garde bien les deux pieds sur les repose-pieds lorsque la chaise est en déplacement.

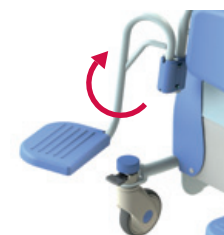

Accoudoir

1. Déverrouillage.
2. Pivotement arrière. Pour refermer, suivez l'ordre inverse.

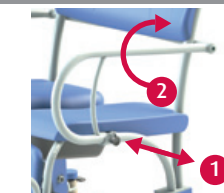

Rechargement des batteries

Après utilisation, raccordez la chaise Elexo XXL au chargeur afin de maintenir les batteries opérationnelles.



Éteint	État de veille.
Vert	Chaise opérationnelle.
Orange clignotant	L'arrêt d'urgence est activé.
Orange	Batterie à mi-charge.
Rouge clignotant	Batterie quasi déchargée.
Rouge	Batterie déchargée.


Pendant le chargement des batteries, l'Elexo XXL n'est pas utilisable.

Fonction toilettes

- *Compatibilité avec WC* : La chaise Elexo XXL peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Elexo XXL peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Abaissement d'urgence

En cas d'arrêt de toutes les fonctions de l'Elexo XXL, utilisez le bouton d'urgence pour faire redescendre le siège.

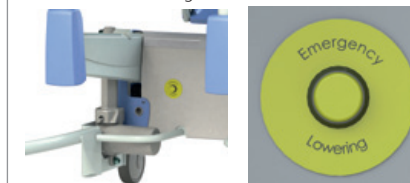

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Elexo XXL doit être nettoyée à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.

Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr