



Instructions de sécurité

- A vant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. 150 kg (Amfora & Vienna) & 135 kg (Stylex)
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la Amfora/Stylex/Vienna




Commande manuelle (Amfora/Vienna)



Commande manuelle (Stylex)




Frein

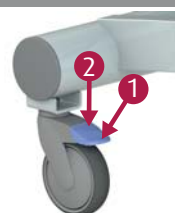

1. Frein
2. Libérer

Barrière latérale

1. Ouvrir
2. Déplacez-le barrière latérale au position souhaitée

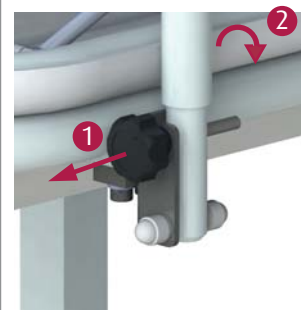

Drainage de l'eau (Amfora/Stylex)

L'eau de la Amfora/Stylex est conduite vers une évacuation via le tuyau de vidange.



Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la Amfora/Stylex/Vienna doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le Protocole de nettoyage et de désinfection complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

Conformément à la réglementation MDR (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, la Amfora/Stylex/-Vienna doivent être entretenues selon les instructions du fabricant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous votre distributeur Lopital.

Important!

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr

