

Instructions de sécurité

- A vant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 135 kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Les pieds doivent être placés sur le repose-pied.
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras du client sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse lors des déplacements et des manoeuvres.



Commande

Réglage vers le haut



Réglage vers le bas



Basculement avant



Basculement arrière



Mise en marche



Bouton de verrouillage




Utilisation

1. Allumez la chaise Reflex en enfonçant simultanément les 2 boutons de réglage vers le haut pendant 1 seconde. Remarque : Après utilisation, la chaise Reflex se met en veille après 60 minutes.
2. Ajustez la position de la chaise, de l'appui-tête et du repose-pied (ou rabattez-le vers le haut).
3. Verrouillez le frein de roues.
4. Ouvrez les accoudoirs et au besoin rabattez-les vers le haut.
5. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assied.
6. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les palettes repose-pieds.


Pour éteindre toutes les fonctions de la chaise Reflex, utilisez le bouton de verrouillage. Pour ensuite rallumer la chaise Reflex, enfoncez les deux boutons de réglage vers le haut pendant 4 secondes.

Frein de roue

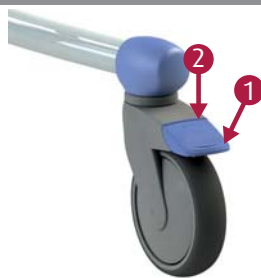

1. Verrouillage du frein de roue
2. Déverrouillage

Repose-pied

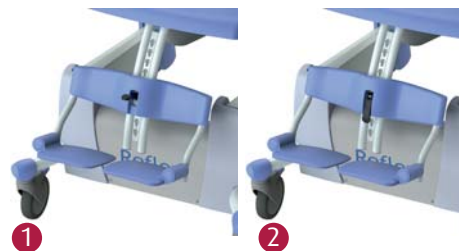


1. Déverrouillage
2. Retirer le repose-pied complet
3. Sélectionner la position désirée
4. Insérer et verrouiller

Veillez à ce que la personne à mobilité réduite garde les deux pieds sur les palettes lorsque la chaise est en déplacement.

Accoudoir avec fermeture avant

1. Déverrouillage
2. Rotation
3. Rabattre vers le haut

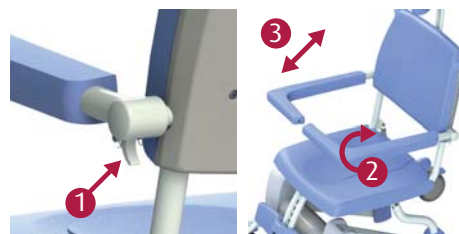

Rechargement des batteries

Après utilisation, raccordez la chaise Reflex au chargeur afin de maintenir les batteries opérationnelles. Éteint État de veille.



Éteint

Vert
Rouge clignotant
Rouge

État de veille

Chaise opérationnelle
Batterie quasi déchargée
Batterie déchargée

Pendant le chargement des batteries, l'Reflex n'est pas utilisable.

Important!

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.

Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : la chaise Reflex peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Reflex peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Abaissement d'urgence

En cas d'arrêt de toutes les fonctions du Reflex, utilisez la manivelle d'urgence pour faire redescendre le siège.



Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Reflex doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le Protocole de nettoyage et de désinfection complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

Conformément à la réglementation MDR (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, les chaises doivent être entretenues selon les instructions du fabricant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous votre distributeur Lopital.

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr

