




### Richtings- / geremd wiel

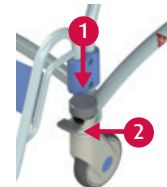


1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

### Voetensteun



- 1
  - 2
- Beide voetsteunen dienen weggedraaid te zijn als de persoon met beperking op de stoel gaat zitten. Zorg ervoor dat de persoon met beperking met beide voeten op de voetplaten rust tijdens het verrijden.

### Armlegger

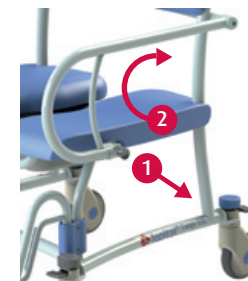

1. Ontgrendelen.
2. Naar achter draaien.

Sluiten in omgekeerde volgorde.

### Gebruik

1. Zet de stoel op de rem!
2. Draai de voetsteunen weg.
3. Klap indien nodig de armleggers omhoog.
4. Ondersteun de persoon met beperking bij het gaan zitten.
5. Sluit de armleggers en laat de voeten van de persoon met beperking op de voetplaten rusten.

Opstaan gebeurt in omgekeerde volgorde.

### Wielblokkering



1. Wielblokkering.
2. Ontgrendelen.

### Toiletfunctie

- Verwijder voordat de persoon met beperking plaats heeft genomen de deksel van de zitting.
- *In combinatie met toilet:* De Tango XXL kan over bijna ieder toilet gereden worden.
- *Met ondersteek:* De Tango XXL kan ook als toiletstoel gebruikt worden. Schuif hiervoor de RVS / kunststof ondersteek in de geleider onder de stoel.

### Reiniging en onderhoud

De Tango XXL dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Het volledige onderhoudsschema is te vinden in de gebruikershandleiding (**te vinden op: [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)**).

In geval van storing contact opnemen met Lopital.  
**Tel:** +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301  
**E-mail:** [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl)

### Gebruikershandleiding

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding gaat u naar: **[www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)**

### Veiligheidsvoorschriften

- Lees de gebruikershandleiding (te vinden op: [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)) vóór gebruik zorgvuldig door.
- Maximale belasting 300kg.
- Zorg ervoor dat de stoel op de rem staat tijdens personentransfers van en naar de stoel.
- Plaats de voeten op de voetsteun.

### Belangrijk!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding.



### Utilisation


1. Verrouillez les freins de la chaise.
  2. Rabattez les repose-pieds.
  3. Rabattez au besoin les accoudoirs vers le haut.
  4. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assoie.
  5. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les palettes du repose-pied.
- Lorsque la personne se remet debout, procédez dans l'ordre inverse.

### Frein de roue



1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

### Roue directionnelle / à frein

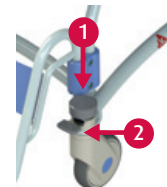


1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

### Repose-pied



- Les deux repose-pieds doivent être dégagés lorsque la personne à mobilité réduite s'assoie. Assurez-vous que la personne à mobilité réduite garde les deux pieds sur le repose-pied lorsque la chaise est en déplacement.

### Accoudoir

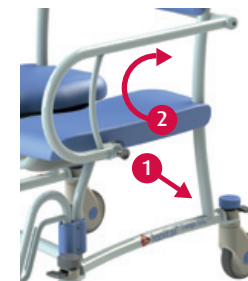

1. Déverrouillage.
2. Pivotement vers l'arrière.

Refermez en suivant l'ordre inverse.

### Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : La chaise Tango XXL peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Tango XXL peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

### Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Tango XXL doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi ([www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.  
**Tél:** +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301  
**E-mail:** [service@lopital.nl](mailto:service@lopital.nl)

### Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur :  
**[www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)**

### Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi ([www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)).
- Mise en charge max. : 300kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Placez les pieds de la personne sur le repose-pied.

### Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.