

Instructions de sécurité

- A vant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 150 kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Les pieds doivent être placés sur le repose-pied.
- Déplacez et manœuvrez la Nemo uniquement dans une position non basculée.
- Lorsque la chaise Nemo est en mouvement, il ne faut jamais ni la faire basculer.



Commande

La Nemo est équipée d'une fonction de basculement allant jusqu'à 30° maximum en arrière.

1. Verrouillez le frein de roues.
2. Tenez-vous de biais derrière la Nemo et saisissez la poignée avec la main droite (1).
3. Tenez le cadre de l'appui-tête avec la main gauche (2).
4. En serrant la poignée de commande, le cadre du siège peut être incliné.




Utilisation

1. Ajustez la position de la chaise et rabattez les repose-pieds.
2. Verrouillez le frein de roues.
3. Rabattez au besoin les accoudoirs vers le haut.
4. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assoie.
5. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les palettes repose-pieds.

Lorsque la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

Frein de roue

1. Verrouillage du frein de roue
2. Déverrouillage

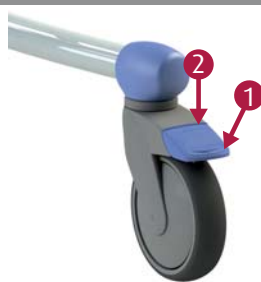

Repose-pied



Les deux palettes repose-pied doivent être rabattues lorsque la personne à mobilité réduite va s'asseoir sur la chaise. Rabattez vers le haut les palettes (1) ou écartez les deux appuis (2). Veillez à ce que la personne à mobilité réduite garde les deux pieds sur les palettes lorsque la chaise est en déplacement.

Accoudoir

1. Relever les accoudoirs



Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : la chaise Nemo peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Nemo peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Nemo doit être nettoyée à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le Protocole de nettoyage et de désinfection complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

Conformément à la réglementation MDR (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, les chaises doivent être entretenues selon les instructions du fabricant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous votre distributeur Lopital.

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr

