

Utilisation

1. Déplacez la Lotus/Lotus compact/Lotus XL en direction du client et retournez les éléments du siège.
2. Si nécessaire, étalez les pattes de la Lotus/Lotus compact/Lotus XL et déplacez-la aussi près que possible du client.
3. Verrouillez le frein de roues.
4. Soulevez le client et remettez le siège.
5. Le client peut maintenant s'asseoir.


Lorsque la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

Instructions de sécurité

- A vant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 200 kg (Lotus/Lotus compact) ou 227 kg (Lotus XL)
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la Lotus/Lotus compact/Lotus XL.



Frein de roue

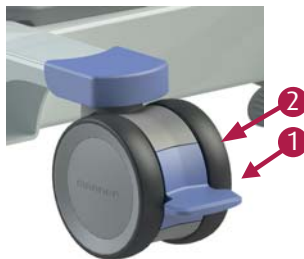

1. Verrouillage du frein de roue
2. Déverrouillage

Piètement




La Lotus/Lotus compact/Lotus XL est équipée d'un système d'écartement des pattes mécanique. En appuyant sur l'une des pédale, les pattes rentreront ou sortiront.

Parties d'assise escamotables



La Lotus/Lotus compact/Lotus XL est équipée de 2 éléments de siège confortables qui peuvent être tournés.

La Lotus/Lotus compact a une entrée de 44 cm lorsque les parties du siège sont tournées. La Lotus XL a une entrée de pas moins de 52 cm.

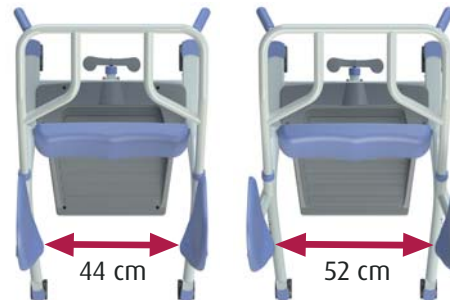

Repose-jambes réglable

En desserrant légèrement les écrous qui fixent le support inférieur de jambe, celui-ci peut être ajusté vers le haut ou vers le bas.



Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Lotus/Lotus compact/Lotus XL doit être nettoyée à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le Protocole de nettoyage et de désinfection complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

Conformément à la réglementation MDR (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, la Lotus/Lotus compact/Lotus XL doivent être entretenues selon les instructions du fabricant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous votre distributeur Lopital.

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr



Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.