

Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 180 kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Les pieds doivent être placés sur le repose-pied.
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras du client sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse lors des déplacements et des manoeuvres.



Commande

Réglage vers le haut




Réglage vers le bas



Mise en marche



2 Secondes

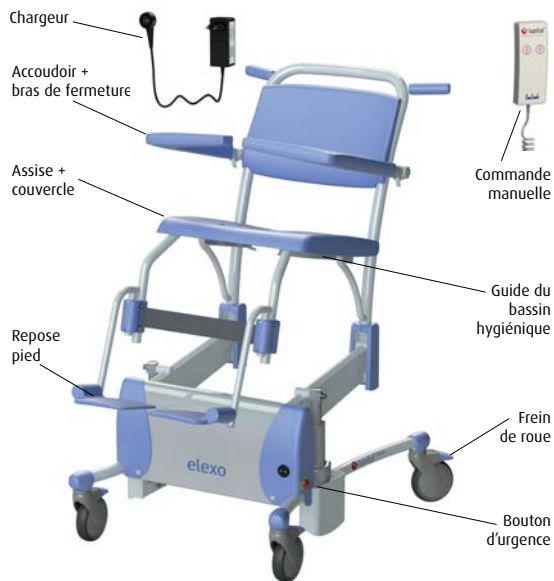


Utilisation

1. Allumez l'Elexo en enfonçant pendant 2 secondes le bouton de réglage vers le haut. Remarque: Après utilisation, la chaise Elexo se met en veille après 60 minutes.
2. Ajustez la position de la chaise et rabattez le repose-pied vers le haut.
3. Verrouillez le frein de roues.
4. Ouvrez les accoudoirs et au besoin rabattez-les vers le haut.
5. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assoie.
6. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les palettes repose-pieds.


Lorsque la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

Frein de roue

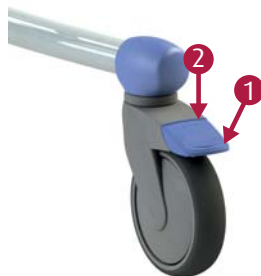

1. Verrouillage du frein de roue
2. Déverrouillage

Repose-pied

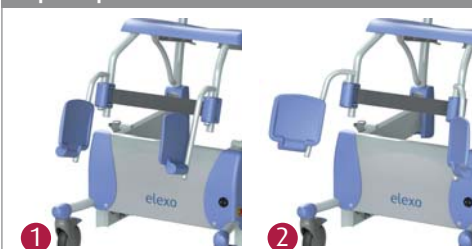

Les deux palettes repose-pied doivent être rabattues lorsque la personne à mobilité réduite va s'asseoir sur la chaise. Rabattez vers le haut les palettes (1) ou écartez les deux appuis (2). Veillez à ce que la personne à mobilité réduite garde les deux pieds sur les palettes lorsque la chaise est en déplacement.

Accoudoir avec fermeture avant

1. Déverrouillage
2. Rotation
3. Rabattre vers le haut



Rechargement des batteries

Après utilisation, raccordez la chaise Elexo au chargeur afin de maintenir les batteries opérationnelles. Éteint État de veille.



Éteint	État de veille
Vert	Chaise opérationnelle
Orange clignotant	L'arrêt d'urgence est activé
Orange	Batterie à mi-charge
Rouge clignotant	Batterie quasi déchargée
Rouge	Batterie déchargée

Pendant le chargement des batteries, l'Elexo n'est pas utilisable.

Important!


Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.

Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : la chaise Elexo peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Elexo peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Abaissement d'urgence

En cas d'arrêt de toutes les fonctions du Elexo, utilisez le bouton d'abaissement d'urgence pour redescendre le siège.

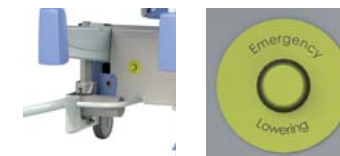

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Elexo doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant. Le Protocole de nettoyage et de désinfection complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

Conformément à la réglementation MDR (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, les chaises doivent être entretenues selon les instructions du fabricant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous votre distributeur Lopital.

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr

