



### Instructions de sécurité

- A vant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi ([www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)).
- Mise en charge max. : 250 kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Les pieds doivent être placés sur le repose-pied.




### Utilisation

1. Ajustez la position de la chaise et rabattez les repose-pieds.
2. Verrouillez le frein de roues.
3. Rabattez au besoin les accoudoirs vers le haut
4. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assied.
5. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les palettes repose-pieds.


Lorsque la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

### Frein de roue

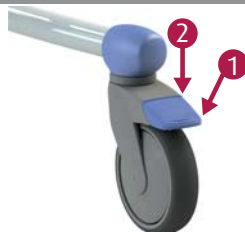

1. Verrouillage du frein de roue
2. Déverrouillage

### Roue directionnelle / à frein

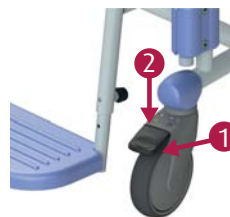

1. Pour bloquer la direction de la roue (1x)  
Frein de roue (2x)
2. Déverrouillage

### Siège détachable

Si vous le souhaitez, le siège du Tango XL peut être détaché du cadre. Cela rend le siège très facile à nettoyer. Aucune saleté ne peut rester entre le cadre et le siège.



### Repose-pied



Les deux repose-pieds doivent être écartés lorsque la personne à mobilité réduite s'assied sur la chaise. Assurez-vous que la personne garde bien les deux pieds sur les repose-pieds lorsque la chaise est en déplacement.

### Accoudoir

1. Relever les accoudoirs



### Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.

### Fonction toilettes

- *Compatibilité avec WC* : la chaise Tango XL peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Tango XL peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

### Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Tango XL doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant.

Le Protocole de nettoyage et de désinfection complet est repris dans le mode d'emploi ([www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)).

Conformément à la réglementation MDR (EU) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, les chaises doivent être entretenues selon les instructions du fabricant. Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi ([www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)).

En cas de panne, adressez-vous votre distributeur Lopital.

### Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : [www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)

